

Link do produktu: <https://www.zawszepiekna.pl/velox-top-af-preparat-do-dezynfekcji-narzedzi-1-l-p-2663.html>



## Velox Top AF - preparat do dezynfekcji narzędzi - 1 L

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena         | <b>36,99 zł</b>             |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>            |
| Marka        | <b>Medi-Sept sp. z o.o.</b> |

### Opis produktu

#### Cechy produktu

- Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN14885).
- Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki grzyby, wirusy w czasie 30 sekund.
- Nie zawiera aldehydów i QAV.
- Delikatny, cytrynowy zapach.
- Preparat gotowy do użycia.

#### Korzyści dla użytkownika

- Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.
- Oszczędność czasu przy wysokiej skuteczności.
- Idealny efekt myjący, bez odbarwień i smug.
- Przyjemność w użytkowaniu.
- Szybkość i wygoda w stosowaniu.

#### Zastosowanie

Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny cytrynowy zapach.

#### Skuteczność mikrobiologiczna

Bakterie (w tym MRSA) wg EN 14885; EN 1040; EN1276: 30 sekund (niski stopień zanieczyszczeń), 1 minuta (wysoki stopień zanieczyszczeń)  
Grzyby (Candida albicans) grzyby wg EN 14885 , EN 1275, EN 1650: 30 sekund (niski stopień zanieczyszczeń), 1 minuty (niski stopień zanieczyszczeń)  
Prątki gruźlicy wg EN 14885 , EN14348: 30 sekund (niski stopień zanieczyszczeń), 1 minuta (wysoki stopień zanieczyszczeń)  
Wirusy osłonkowe (np.: HBV, HIV, HCV, wirus grypy A, B, C, Veccinia, BVDV, Herpes simplex) wg BGA(RKI)/DVV: 30 sekund (z zanieczyszczeniem)  
Wirus Adeno wg EN 14476: 30 sekund  
Wirus Noro wg EN 14476: 30 sekund  
Wirus Rota wg EN 14476: 1 minuta

#### Sposób użycia

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe).

**Skład**

100 g zawiera:

- 37,0 g propan-1-ol
- 24,0 g alkohol etylowy

**Opakowanie**

Butelka 1 L ze spryskiwaczem